

Geenitestinäytteiden lähettäminen Laboklinille

1. Tilaa ilmaiset näytteenotto- ja lähetystarvikkeet Laboklinin Suomen toimistolta sähköpostitse osoitteesta info@laboklin.fi tai verkkokaupasta labogen.fi.
2. Jos eläinlääkärisi käyttää Laboklinin palveluita, saat häneltä kaiken tarvittavan näytteenoton yhteydessä.
3. Eläinlääkäri/virallinen näytteenottaja ottaa näytteen ja tarkistaa samalla eläimen tunnusteen.
4. Täytä verkosta lataamasi tutkimuslomake (shop.labogen.com/fi/hinnasto-ja-laehetteet) huolellisesti tekstaten. Valikoima, tuotenumerot ja hinnasto löytyvät samalta sivulta. **Huom: jos olet ostanut ja maksanut testin verkkokaupassa, käytä näytteenottomateriaalien mukana tulevaa lomaketta**, sillä siitä testin käsittelijä näkee, että testi on jo maksettu.
5. Postita näyte Laboklinin Suomen toimistoon osoitteeseen **LABOKLIN, tunnus 5017015, 01006 vastauslähetys**, josta näytteet lähetetään päivittäin kuriirikuljetuksena Saksaan laboratorioomme.
6. Laboklin analysoi näytteen ja saat tulokset sähköpostitse (halutessasi myös postitse).
7. Jos testiä ei ole maksettu verkkokaupassa, saat laskun tutkimuksista sähköpostitse. Lasku maksetaan Nordean pankkitilille.

LABOGEN
GENETIC TESTING BY LABOKLIN

LABOKLIN Suomen toimisto
Neitsytpolku 8 E, 00140 Helsinki, 044-0675353
info@laboklin.fi | www.laboklin.fi

DNA-näyte

Geenitutkimus voidaan tehdä verinäytteestä tai poskisolunäytteestä. Huom! Virallista tulosta varten eläinlääkäri/virallisen näytteenottajan tulee tarkistaa eläimen tunniste ja allekirjoittaa lähete.

Verinäyte

EDTA-veri on sopivin näytemateriaali DNA-testeihin! Verinäyte otetaan EDTA-putkeen (1 ml riittää). Putkeen merkitään eläimen nimi ja mikrosirunumero.

Vanutikkujen/poskisoluharjan käyttöohjeet

Poskisolunäyte on luotettava geenitestimateriaali, jos näyte otetaan huolellisesti seuraavia ohjeita noudattaen:

1. Eläintä ei tulisi ruokkia tai imettää n. 2 tuntia ennen näytteenottoa, jottei näytteeseen tulisi muusta lähteestä peräisin olevaa DNA:ta. Eläin olisi myös hyvä eristää muista eläimistä.
2. Hankaa vanutikkua/poskisoluharjaa posken limakalvolla voimakkaasti noin 15 sekunnin ajan, jotta siihen tarttuu riittävästi soluja.
3. Ota aina kaksi näytettä. Geenitestiä ei voi tehdä, jos käytettävissä ei ole tarpeeksi geneettistä materiaalia.
4. Kuivata vanutikkuja/poskisoluharjaa n. 2 tunnin ajan näytteenoton jälkeen putkea sulkematta. Liika kosteus voi pilata näytteen kuljetuksen aikana.
5. Merkitse eläimen tiedot (nimi/mikrosirunumero) näytteenottoputkeen. Liimaa myös yksi mukana tulleista viivakooditarroista pitkittäissuunnassa jokaiseen putkeen sekä yksi läheteeseen ja lähetä näytteet meille.

Näytteen pakkaus

Pakkaa näyte hyvin. Pakkauksen on koostuttava kolmesta osasta: näyteputki, suojarahkaus, esim. minigrip-pussi ja tukeva ulkopakkaus. Lähetä se postitse Laboklinin Suomen toimistoon: **LABOKLIN**, tunnus 5017015, 01006 vastauslähetyks. **Muista laittaa tekstaten täytetty tutkimuslomake mukaan pakkaukseen.**